




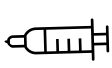





Rekommenderad rörföljd – venöst

Blododling: Ett rör enligt rörföljden → Blododling → Resterande rör enligt rörföljden

Rörtyp	Färgguide	Blandning
Na-citratrör	 Ljusblå	3–4 ggr Om butterfly används ska ett Na-citratrör användas som slaskrör innan provtagning.
Serumrör koagulationsaktivator	 Röd	8–10 ggr
Serumrör med gel koagulationsaktivator	 Gul	8–10 ggr
Li-heparinrör med gel	 Mintgrön	8–10 ggr
Li-heparinrör utan gel	 Mörkgrön	8–10 ggr
Blodgasspruta		Enligt leverantörens rekommendationer
Na-heparinrör	 Mörkblå	8–10 ggr
EDTA-rör	 Lila	8–10 ggr
Na-fluorid/ K-oxalatrör	 Grå	8–10 ggr