


Hämta undersökningar från PACS till AW server


1. Välj "Retrieve_from_Sectra"

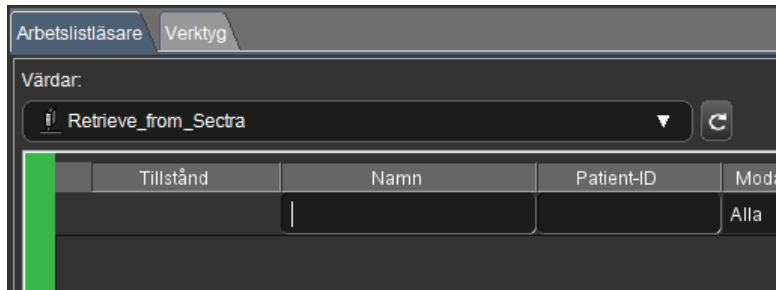

2. Skriv in personnummer under Patient-ID och enter.



3. Du får upp namnet i listan och expanderar listan med "+" till vänster i raden.

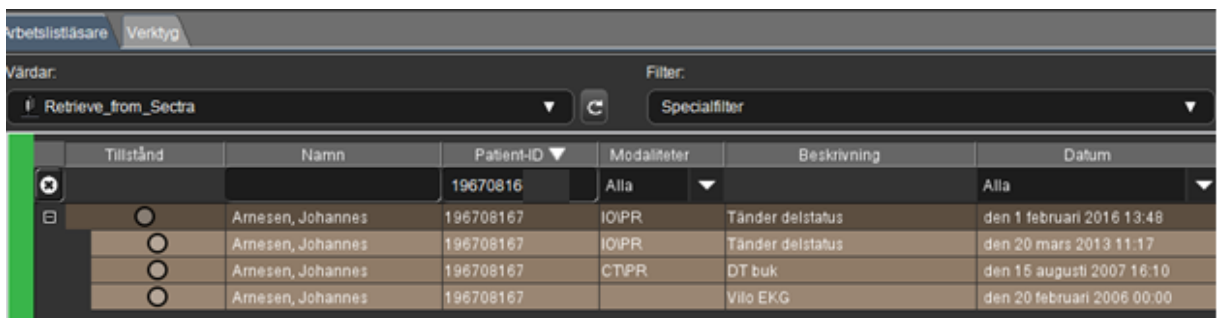

4. Klicka på den raden du vill importera (tex. DT buk) och då kommer alla serier upp i serielistan nedan. Välj raden som är volymet (om det inte står i klartext), högerklick och välj "Kopiera till lokal"

Tilstånd	Namn	Patient-ID	Modaliteter	Beskrivning	Datum
Alla		196708167	Alla		Alla
<input type="radio"/>	Arnesen, Johannes	196708167	IOPR	Tänder delstatus	den 1 februari 2016 13:48
<input type="radio"/>	Arnesen, Johannes	196708167	IOPR	Tänder delstatus	den 20 mars 2013 11:17
<input checked="" type="radio"/>	Arnesen, Johannes	196708167	CTPR	DT buk	den 15 augusti 2007 16:10
<input type="radio"/>	Arnesen, Johannes	196708167		Vllo EKG	den 20 februari 2006 00:00

Typ	Serie	Be
Undersökning:		
Other	1	
Other	1	
Other	1	
Other	2	
Other	3	
Other	501	Kopiera till lokal
Other	603	

5. Ändra tillbaka till "AW server" under Vårdar, skriv in personnumret om det inte följde med över och se vilka undersökningar som finns på patienten. Här har volymet kommit över och kan granskas t.ex. i 3D Viewer i AW-server.

Tilstånd	Namn	Patient-ID	Modaliteter	Beskrivning	Datum
Alla		196708167	Alla		Alla
<input checked="" type="radio"/>	Arnesen, Johannes	196708167	CT	DT buk	den 15 augusti 2007 16:10

Typ	Serie	Be
Undersökning: DT buk		
Original	3	AktuBukSpi 3.0 B30f

För ytterligare information om AW server, gå in under fliken "Verktyg", välj "Funktioner" och klicka på "Starta" under Bruksanvisning. Välj User Guide eller annan detaljerad information om olika program i kolumnen till vänster.

(** OBSERVERA att det kan komma varningar för certifikatfel i olika webbläsare **)

