



Lagra bilder på CD eller USB minne

Användarstöd kliniker

1. Välj undersökningsrad i patienthistorik och klicka på vänster musknapp.

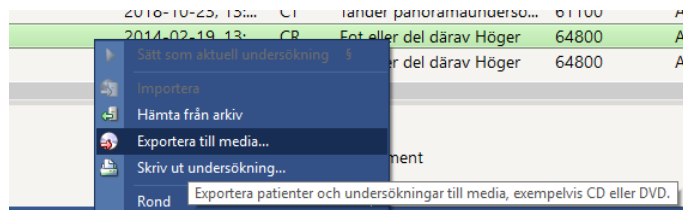

2. Menyn för exportera till media öppnas där du väljer vad som ska exporteras.

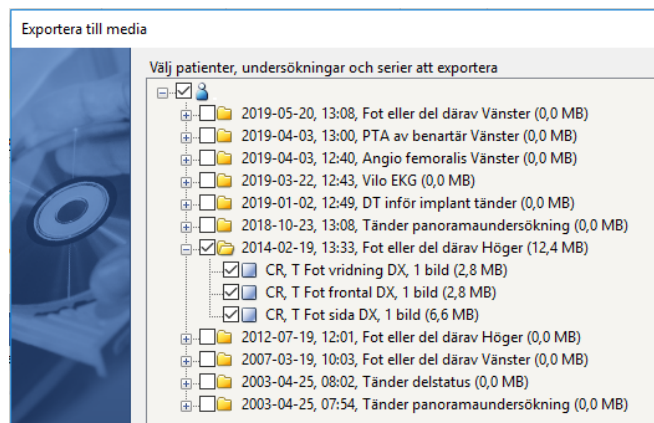


3. Du kan välja vilken information och program som skall medfölja bilderna. Både remiss och svar kan inkluderas. Det är viktigt att DICOM-bilder och DICOM-visningsprogram alltid inkluderas – dessa är alltid markerad.

<input type="checkbox"/> Exportera endast nyckelbilder och nyckelserier	<input type="checkbox"/> En patient per media	<input type="button" value="Välj alla"/>
<input type="checkbox"/> Exportera remisser	<input type="checkbox"/> Inkludera bilder och visningar i JPEG-format	<input type="button" value="Avmarkera alla"/>
<input type="checkbox"/> Exportera scannade dokument	<input checked="" type="checkbox"/> Inkludera DICOM-bilder	
<input type="checkbox"/> Exportera utlåtanden (inklusive utkast)	<input checked="" type="checkbox"/> Inkludera DICOM-visningsprogram	
<input type="checkbox"/> Anonymisera	<input checked="" type="checkbox"/> Inkludera annoteringar	

OBS! För exportering av bilder till tandläkare och käkkirurger, se punkt 5.

4. Välj vilken enhet (Destination) som du vill exportera till i drop-down listan. Klicka OK för att starta export.

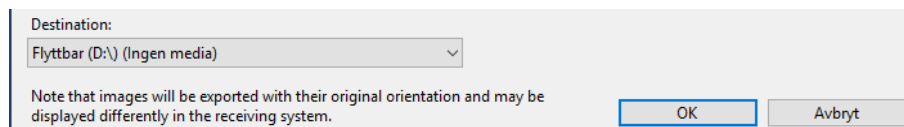


Destination:
Flyttbar (D:\) (Ingen media)

Note that images will be exported with their original orientation and may be displayed differently in the receiving system.

OK Avbryt

5. För exportering av bilder som ska hanteras av tandläkare och käkkirurger, bocka i rutan ”Inkludera bilder och visningar i JPEG-format”

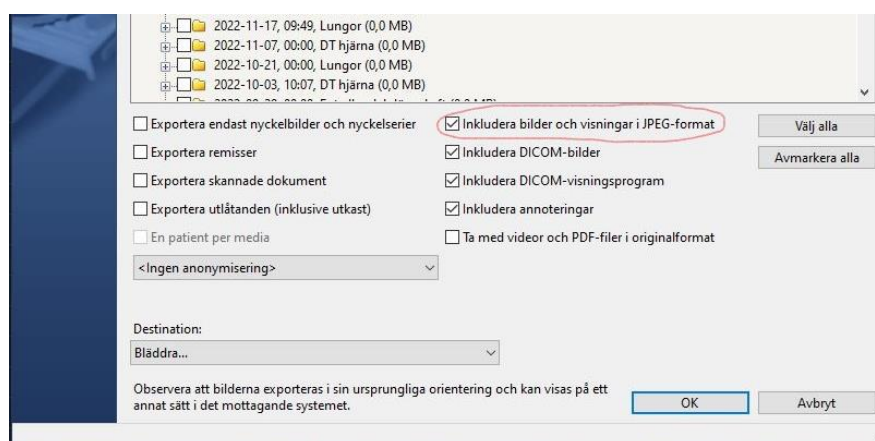

2022-11-17, 09:49, Lungor (0,0 MB)
2022-11-07, 00:00, DT hjärna (0,0 MB)
2022-10-21, 00:00, Lungor (0,0 MB)
2022-10-03, 10:07, DT hjärna (0,0 MB)

Exportera endast nyckelbilder och nyckelserier Inkludera bilder och visningar i JPEG-format

Exportera remisser Inkludera DICOM-bilder

Exportera skannade dokument Inkludera DICOM-visningsprogram

Exportera utlåtanden (inklusive utkast) Inkludera annoteringar

En patient per media Ta med videor och PDF-filer i originalformat

<Ingen anonymisering>

Destination:
Bläddra...

Observera att bilderna exporteras i sin ursprungliga orientering och kan visas på ett annat sätt i det mottagande systemet.

OK Avbryt