

Spara en presentation inför rond

Användarstöd kliniker





När du öppnar en undersökning med knappen **Bilder** kommer IDS7 att presentera ett automatiskt visningsprotokoll på skärmen med aktuell och jämförande (om detta finns). Om detta är OK behöver du inte ändra presentationen, men vid behov kan du ändra presentationen och spara en ny rondpresentation.

1. Öppna ORTOPEDENS rond och välj en patient.



2. Gå till matrisfönstret **Matris** för att skapa en presentation. Matrisfönstret visar normalt aktiverat (aktuell) undersökning på vänster skärm och förra undersökningen (historik) på höger skärm.

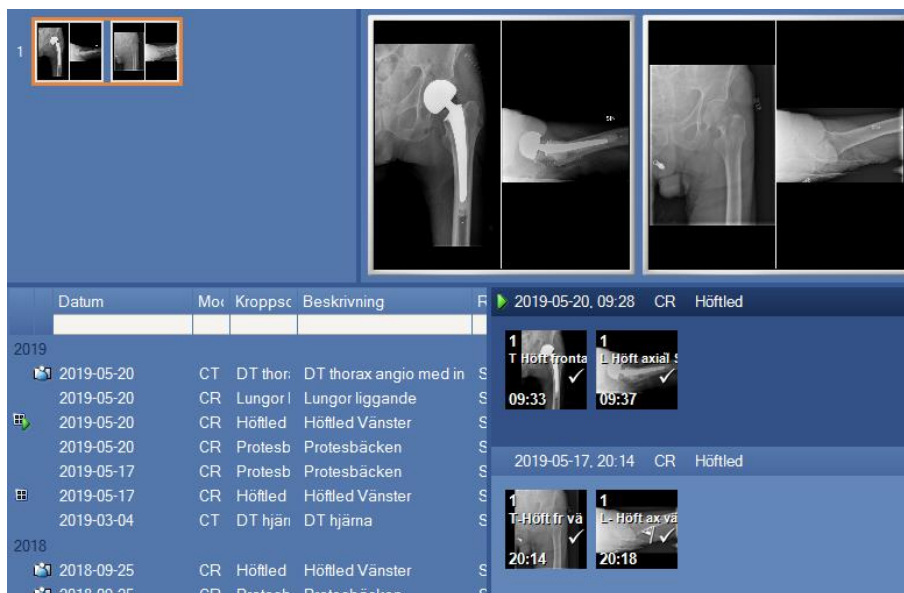

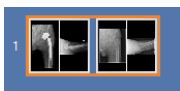

Det finns 1 Layout med 2 skärmar. Varje skärm 2-delat. Orange ram indikerar vilken ram som visas på bildskärmen (vid flera layout)




Bilderna är öppnat för visning och finns i listan till höger. Dubbelklick för att lägga till eller ta bort.




Den gröna trekanten indikerar att detta är den aktuella undersökningen och visas alltid i matrisfönstret.


3. Lägg till eller ta bort en Layout med knapparna

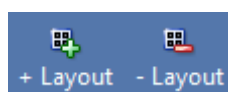

Bilder kan flyttas upp till skärmen med "drag-and-drop".

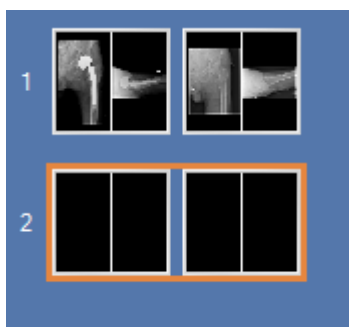

4. Lägg till skärm med knappen

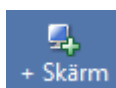

om du önskar att skapa manuell presentation på rondstationen när du sitter på din dator med en skärm.

5. Spara din rondpresentation med knappen Rond



i bildfönstret.