


# Sök patient och visa bilder i IDS7







## Användarstöd kliniker


Flödet gäller val av ny patient i IDS7. Om du väljer en ny patient från VAS kommer denna patient automatisk vara aktiverad patient i IDS7.

1. I informationsfönstret klickar du på **Sök (CTRL-G)**. 
2. Börja skriv det du söker efter, till exempel "Nilsson". Resultaten visas medan du skriver. Om du får för många träffar kan du lägga till fler delar av namnet eller annan information om patienten. Du kan söka efter personnummer, namn och födelsedatum.



3. Välj patienten i listan med vänster musknapp. Om bara en patient hittas med sökningen kan du välja den genom att trycka på **Enter**.
4. Välj undersökningen du vill titta på under Patienthistorik med att klicka på raden och aktivera den med paragraf-tecknet.

Patienthistorik för Testsson, Test Tary				
	Tillagd i ronder	Datum och tid	Mo...	Beskrivning
		2016-04-04, 00:...	CT	DT hjärna
		2016-04-04, 00:...	CT	DT ansiktsskelett
		2016-03-29, 00:...		Höftled Höger

5. Bilderna syns som tumnaglar under patienthistoriken. Välj  eller dubbelklicka på tumnagelbild för att granska. Remisstext och svar finns i höger kolumn.