

AccuVein AV 400 - venscanner

Syfte

Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och upptäcka eventuella brister som kan medföra skador för patient/personal.

Användningsområde

AccuVein AV 400 är avsedd som hjälpmedel vid provtagning för att lokalisera ytliga vener.

Placering

Antal på avd:	1 st
Bruksanvisning:	Fullständig bruksanvisning finns i behandlingsrummet. Läs igenom innan apparat tas i bruk.
Teknisk info:	Finns i bruksanvisningen.
Förvaring:	I behandlingsrummet på bänken i laddningsdockan. Enheten läggs i stativet vid användning. Efter användning placeras AccuVein åter i sin laddningsdocka.

Ansvarsförhållanden

Ansvarsområde	Ansvarig
Apparaturutbildning	Enhetschef
Iordningsställande	Sjuksköterska/Barnsköterska
Funktionskontroll	Sjuksköterska/Barnsköterska
Rengöring	Sjuksköterska/Barnsköterska
Återställande	Sjuksköterska/Barnsköterska

Restriktioner för användningen inom användningsområdet

AccuVein instrumentet avger synlig och osynlig laserstrålning. Se inte in i strålen och rikta inte strålen mot barnets ögon.

Vid användning rekommenderas ögonskydd på barnet.

Använd ej AccuVein vid provtagning på skalpen.

Endast av tillverkare godkända tillbehör får användas.

Iordningsställande/Funktionskontroll

Inspektera apparaten innan användning. Se så att batteriet är laddat.

Användning

Håll instrumentet 10-30 cm över huden för att lokalisera vener. Ljuset ska vara centralt riktat över venens mittlinje för att få korrekt bedömning av venens läge.

Fullständig användningsinformation finns i bruksanvisningen s. 155-156.

Skötsel/rengöring

Torka av AccuVein efter varje användning med Meliceptol wipes.

Får aldrig nedsänkas i vatten eller autoklaveras.

Felsökning/åtgärd

För felsökning se s. 158 i bruksanvisningen.

Vid fel på apparaten gör en felanmälan till Teknik akuten via webben. Vid akuta eller livshotande tillstånd skall anmälan göras via telefon till Teknik Akuten tel. 710 10

Service

Medicinsk Teknik ansvarar för service och årligt förebyggande underhåll.

Utvärdering

Utrustningens handhavande utvärderas i samband med iordningställande/återställande/rengöring och funktionskontroll.

Vid årlig teknikrond utvärderas också utrustningens status.

Säkerhetsföreskrifter

Se s. 14 9 i bruksanvisningen.