

# Befuktare Fisher and Paykel 850

## Syfte

Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och upptäcka eventuella brister som kan medföra skador för patient/personal.

## Användningsområde

Befuktaren är avsedd att användas för att värma och befukta inandningsluften för patienter i CPAP, höglödesgrimma samt befuktad neopuff.

## Placering

Utrustning som inte används förvaras i apparatrummet eller på avdelningens IVA-salar.

## Tillbehör

Avsedda tillbehör förvaras i yttre förrådet på avd 56.

## Ansvarsförhållanden

Ansvarsområde	Ansvarig
Apparatutbildning	Enhetschef
Iordningsställande	Sjuksköterska/Barnsköterska
Funktionskontroll	Sjuksköterska/Barnsköterska
Rengöring	Sjuksköterska/Barnsköterska
Återställande	Sjuksköterska/Barnsköterska

## Restriktioner för användningen inom användningsområdet

Endast av tillverkare godkända tillbehör får användas.

## Iordningsställande

Se bruksanvisning för Fisher & Paykel befuktningsskammare /slangset.

## Användning

Se bruksanvisning.

---

## Skötsel/rengöring

Befuktningskammaren och slangarna är patientbundna, de byts ut en gång per vecka och kastas efter varje patient. Befuktarenheten och elkablarna torkas av med meliseptol.

## Felsökning/åtgärd

Vid fel på apparaten gör en felanmälan till Teknik akuten via webben. Vid akuta eller livshotande tillstånd skall anmälan göras via telefon till Teknik Akuten tel. 710 10

## Service

Medicinsk Teknik ansvarar för service och årligt förebyggande underhåll.

## Utvärdering

Utrustningens handhavande utvärderas i samband med iordningställande/återställande/rengöring.

Vid årlig teknikrond utvärderas också utrustningens status.

## Skötsel av batteri

Apparaten bör alltid stå kopplad i eluttag även mellan användning.