

Bilisoft

Syfte

Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och upptäcka eventuella brister som kan medföra skador för patient/personal.

Användningsområde

Bilisoft fototerapilampa är avsedd för att ge effektiv och säker behandling vid förhöjt bilirubin hos nyfödda.

Placering

- Antal på avd.:** 4 st
- Bruksanvisning:** Fullständig bruksanvisning finns i grön pärm nr 2 för medicinsk teknik på hylla i avdelningens behandlingsrum. Läs igenom anvisning innan apparat tas i bruk.
- Teknisk info:** Finns i bruksanvisningen.
- Förvaring:** Förvaras i avdelningens sängvårdsrum mellan användningarna.

Ansvarsförhållanden

Ansvarsområde	Ansvarig
Apparatutbildning	Enhetschef
Iordningsställande	Sjuksköterska/Barnsköterska
Funktionskontroll	Sjuksköterska/Barnsköterska
Rengöring	Sjuksköterska/Barnsköterska
Återställande	Sjuksköterska/Barnsköterska

Restriktioner för användningen inom användningsområdet

Endast av tillverkare godkända tillbehör får användas.

Iordningsställande/Funktionskontroll

Se så det inte finns några yttre skador på enheten innan användning. Kontrollera att det inte finns stora mängder ludd på luftfiltret. Ett mjukt överdrag (engångs) sätts över den fiberoptiska plattan. Den upplysta sidan ska vara vänd uppåt och ska ligga emot överdragets vadderade sida.

Användning

- Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren.
- Skydda barnets ögon med avsedda ögonskydd i lämplig storlek.
- Så mycket som möjligt av barnets hud ska täckas av den fiberoptiska plattan.
- Observera barnets temperatur
- Tänk på att barnet kan behöva mer vätska under behandlingen.

Skötsel/rengöring

Enhetens samtliga ytor rengörs med Meliseptol. Koppla ur enheten från strömkällan före rengöring. Trasan får inte vara så fuktig att det finns risk att vätska tränger in i enheten. Kvartalsvis kontroll luftfiltret sid 7-1 Dammsugning 7-5.

Felsökning/åtgärd

Vid fel se bruksanvisning sidan 6-1 till 6-4.

Vid fel på apparaten gör en felanmälan till Teknik akuten via webben. Vid akuta eller livshotande tillstånd skall anmälan göras via telefon till Teknik Akuten tel. 710 10

Service

Medicinsk Teknik ansvarar för service och årligt förebyggande underhåll.

Utvärdering

Utrustningens handhavande utvärderas i samband med iordningställande/återställande/rengöring och funktionskontroll.

Vid årlig teknikrond utvärderas också utrustningens status.

Säkerhetsföreskrifter

- Placera inga föremål såsom filter, kläder, blöjor ovanpå enheten. Dessa föremål kan störa korrekt kylning av enheten.
- Skydda barnets ögon med avsedda solglasögon i lämplig storlek.
- Använd inte förlängningskablar och grenuttag
- Placera aldrig enheten så den kan välta
- Hantera den fiberoptiska plattan och kabeln varsamt så inga skador uppstår.