

Braun perfusor spaceplus sprutpump

Syfte

Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och upptäcka eventuella brister som kan medföra skador för patient/personal.

Användningsområde

Sprutpumpen är avsedd att användas på vuxna, barn och spädbarn för intermittent eller kontinuerlig tillförsel av parenterala och enterala vätskor via kliniskt godkända administreringsvägar. Sprutpumpen kan användas för tillförsel av läkemedel, blodprodukter och infusionsvätskor.

Placering

Utrustning som inte används förvaras i apparatrummet.

Tillbehör

Avsedda aggregat förvaras i förrådsskåp på avd 56.

Ansvarsförhållanden

Ansvarsområde	Ansvarig
Apparatutbildning	Enhetschef
Iordningsställande	Sjuksköterska
Funktionskontroll	Sjuksköterska
Rengöring	Sjuksköterska
Återställande	Sjuksköterska

Restriktioner för användningen inom användningsområdet

Endast av tillverkare godkända infusionsaggregat får användas.

Iordningsställande

Se bruksanvisning samt lathund på apparaten. Följ qr-kod för övrig information.

Funktionskontroll

Före varje användning, se bruksanvisning.

Användning

Se bruksanvisning

Rengöring

Använd inga desinfektionsmedel i sprayform kring nätanslutningen. Apparaten rengörs mellan varje patient samt vid behov med Meliseptol. Detaljerad rengöringsanvisning finns i originalbruksanvisning sidan 55.

Felsökning/åtgärd

Vid fel på apparaten gör en felanmälan till Teknik akuten via webben. Vid akuta eller livshotande tillstånd skall anmälan göras via telefon till Teknik Akuten tel. 710 10.

Service

Medicinsk Teknik ansvarar för service och förebyggande underhåll en gång/år.

Utvärdering

Utrustningens handhavande utvärderas i samband med iordningställande/återställande/rengöring och funktionskontroll.

Vid årlig teknikrond utvärderas också utrustningens status.