

Bröstpump Medela Symphony

Syfte

Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och upptäcka eventuella brister som kan medföra skador för patient/personal.

Användningsområde

Pumpning av bröstmjölk.

Placering

Utrustning som inte används förvaras i avdelningens mjölkök samt sängvårdsrum.

Tillbehör

Avsedda tillbehör förvaras i avdelningens mjölkök samt sängvårdsrum.

Ansvarsförhållanden

Ansvarsområde	Ansvarig
Apparatutbildning	Enhetschef
Iordningsställande	Sjuksköterska/Barnsköterska
Funktionskontroll	Sjuksköterska/Barnsköterska
Rengöring	Sjuksköterska/Barnsköterska
Återställande	Sjuksköterska/Barnsköterska

Restriktioner för användningen inom användningsområdet

Endast av tillverkare godkända och intakta tillbehör får användas.

Håll apparaten torr, sänk aldrig ner apparaten i vatten eller andra vätskor. Spraya hellre vätska än att hälla direkt på pumpen.

Dra alltid ur kontakten till Symphony bröstpump omedelbart efter användning.

Tänk på att pumpa en bit från syre och syrgas administrering.

Iordningsställande

Tillämpa god handhygien inför användning. Välj lämplig storlek på tratt och flaska. Dessa skruvas ihop och fästs med hjälp av slang till pump. Se till att alla delar är torra innan ihop koppling.

Användning

Se bruksanvisning.

Skötsel/rengöring

Torkas av med ytdesinfektion efter användning. En gång/vecka byts membranerna innanför pumpens lock samt slangarna. Dessa diskas i diskdesinfektorn. Hela enheten torkas av med ytdesinfektion.

Trattar, anslutningsdel och membran ansvarar den pumpande föräldern för. Dessa delar sköljs av efter varje användning med kranvatten. 1 gång/dygn byts dessa delar ut.

Felsökning/åtgärd

Vid fel på apparaten gör en felanmälan till Teknik akuten via webben. Vid akuta eller livshotande tillstånd skall anmälan göras via telefon till Teknik Akuten tel. 710 10

Service

Medicinsk Teknik ansvarar för service och årligt förebyggande underhåll.

Utvärdering

Utrustningens handhavande utvärderas i samband med iordningställande/återställande/rengöring.

Vid årlig teknikrond utvärderas också utrustningens status.