

# Viktig information innan gåbordet tas i bruk!



(Gäller Bure gåbord T-motion, sesam: 37831, 37830)

**Bure Gåbord har fulladdat batteri när den levereras ut från Länservice.  
För att säkerställa att batterikapaciteten bibehålls, kopplas strömmen ifrån vid leveransen.**

**Innan användning måste batteriet kopplas på enligt någon av nedan alternativ.**

## Alt. 1

Gåbordet har av/på knapp på batteriboxen:

Tryck på knappen ON – Gåbordet har nu funktion!



## Alt. 2

Gåbordet saknar av/på knapp på batteriboxen:



a) Öppna kåpan på elektroniken med ex. en skruvmejsel.



b) Koppla in batterikabeln.  
Sätt tillbaka kåpan.

