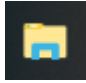


Exportera bilder från DentalEye till USB

Vid överföring av röntgen till USB som patienten lämnat till oss, ska ett redan använt USB-minne först formateras av säkerhetsskäl. Nytt USB i förpackning behöver inte formateras.

Formatera genom att leta upp USB i utforskaren, högerklicka och välja formatera


- Anslut USB-minnet till datorn.

- **Öppna Utforskaren** antingen via ikon  eller via förstoringsglasat



högerklicka och öppna Utforskaren.

- Nu öppnas utforskaren. Klicka på **”Den här datorn”** och kontrollera så att du ser en **”USB-enhet”** samt vilken enhetsbeteckning den har. I detta fall ”D:”

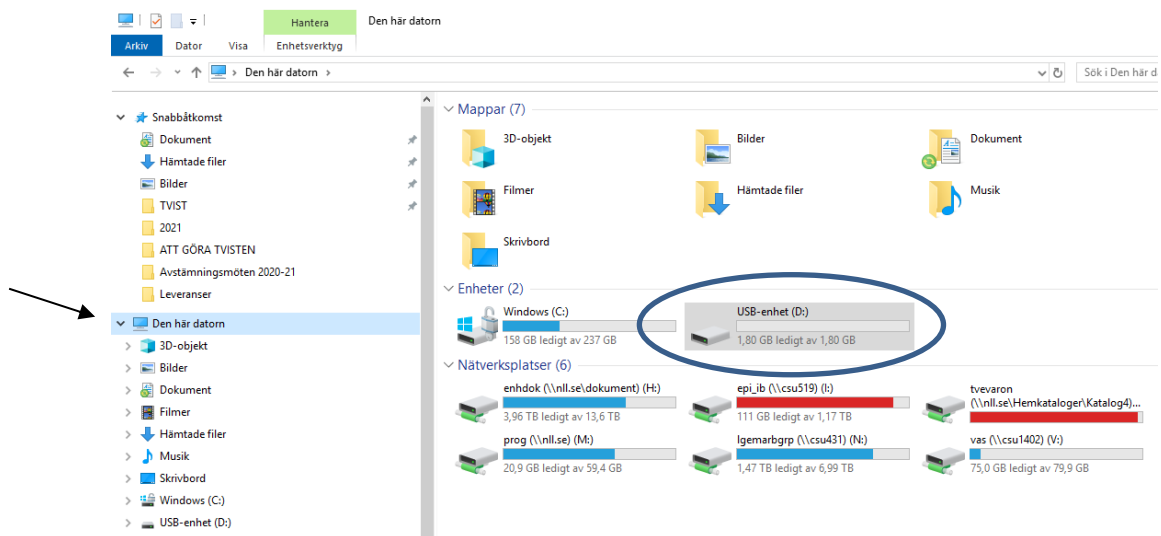


- Öppna därefter aktuell patient och bildkort i DentalEye.
- **Om du vill exportera enstaka bild** så markerar du aktuell bild.


Om det är flera bilder men inte hela bildkortet du vill exportera så måste du exportera bild för bild.

Om Du vill exportera hela bildkortet behöver du inte markera någon särskild bild utan bara bildkortet


- Högerklicka på vald bild och välj **Exportera bilder** alt. gå via Bild i menyn och välj **Exportera bilder**.

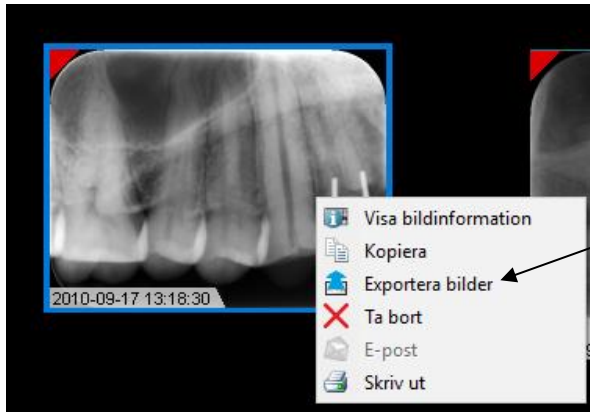


- Du väljer mapp dit du vill exportera bilden genom att klicka på ”tre prickar”.

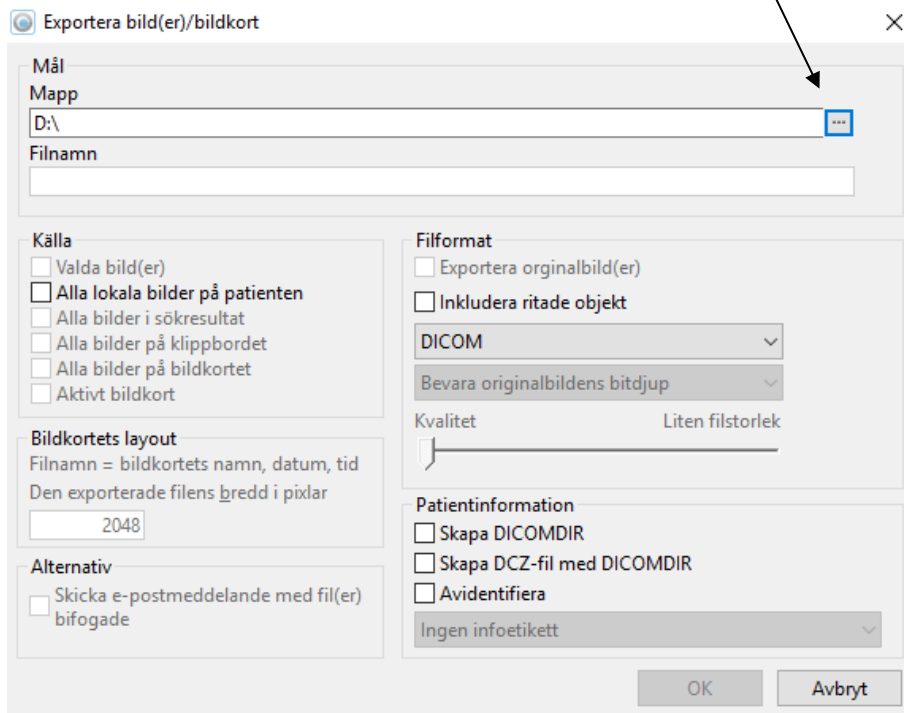

- Här väljer du USB-enhet (D:)

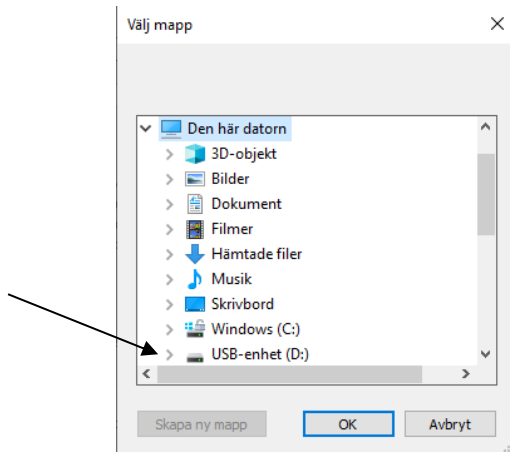


- Tillbaka i föregående ruta så väljer du:

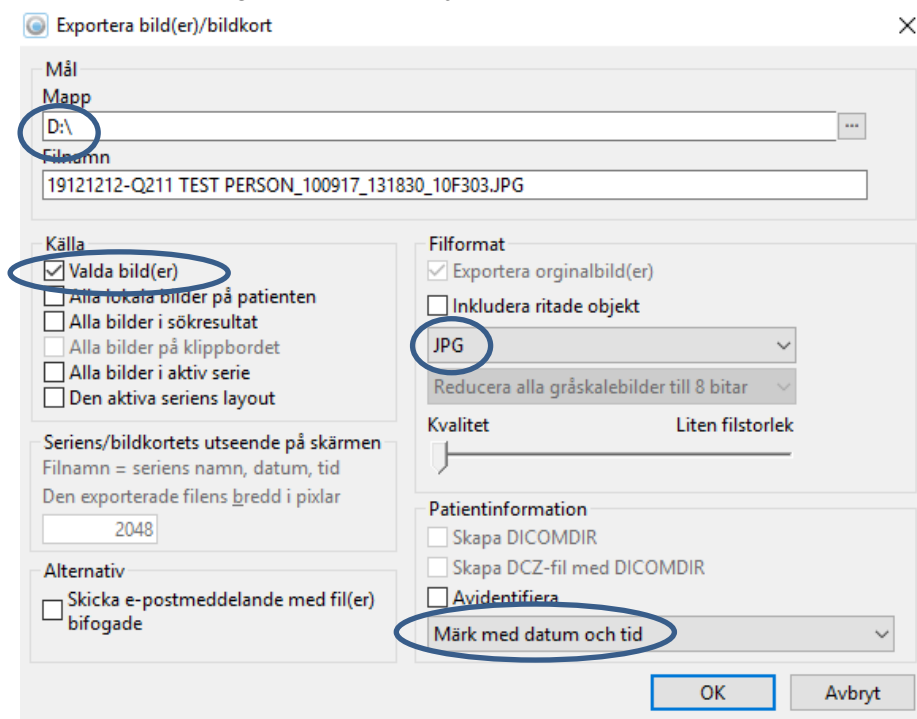


- **Mapp:** ange adressen dit bilden ska exporteras, i detta fall D:
- **Källa:** bocka i vad exporteringen avser.
- **Filformat:** välj JPG.
- **Patientinformation:** välj vilken info-etikett som ska följa med bilden.
- Välj **OK**.
- Bilden har nu förts över till USB-minnet

För att på ett säkert sätt ta bort USB-minnet bör du först stänga av det.

Välj ”**Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media**” som Du hittar på listan nere vid högra hörnet genom att klicka på pil-symbolen och därefter USB-symbolen.

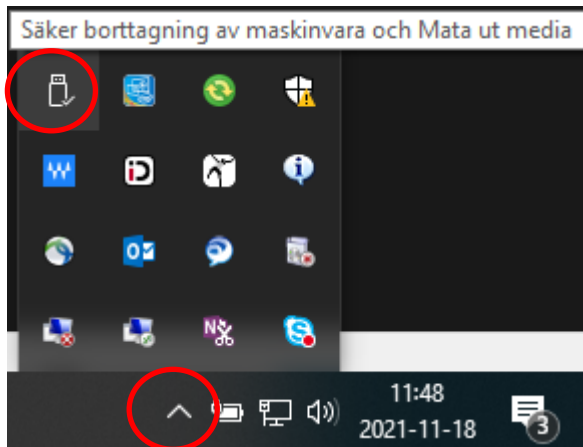

- Då öppnas nedanstående:

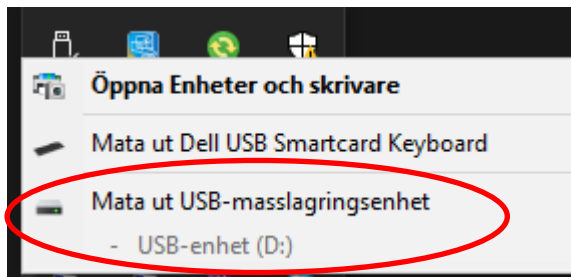

- Välj rad för Enhet (D:)