


## Importera bilder från CD

Först kan man kontrollera vilka foton/röntgenbilder som ligger på CD:n

- Sätt in CD:n i datorn
- Gå via Start-flaggan, högerklicka och öppna Utforskaren




- Markera "Den här datorn"

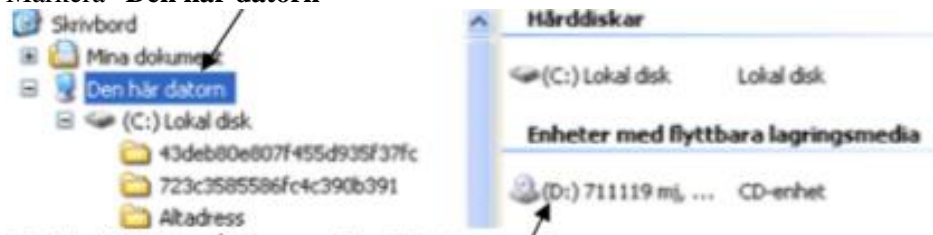


- Dubbelklicka på ikonen för "CD-enhet"
- Då ser man att det ligger foton/rtg-bilder där (ett foto, röntgenbild/ikon)



- Om man klickar på "Visa" i menyraden och sedan "Miniaturer" ....

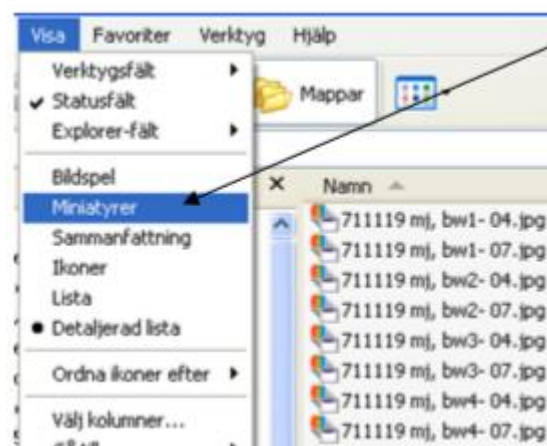


- ...så visas alla foton/rtg-bilder istället för ikonerna.

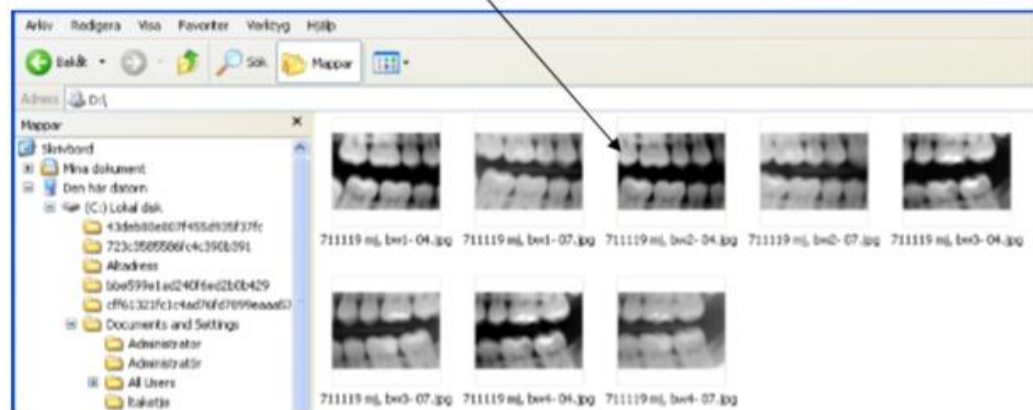


- Här får man en indikation på hur stor mall man ska välja i DentalEye.

### Importera bilderna till patientens DentalEye från CD


Ta upp patientens DentalEye och **välj en lämplig mall.**

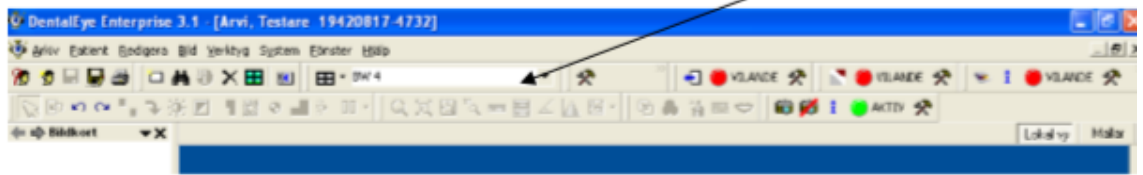


- Gå via **"Bild"** i menyraden och välj **"Importera bilder"**

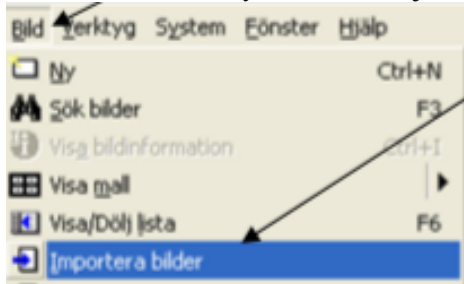


- I rutan som kommer upp klickar man på pilen i fönstret ”Leta i” och markerar (D:) där CD:n ligger.

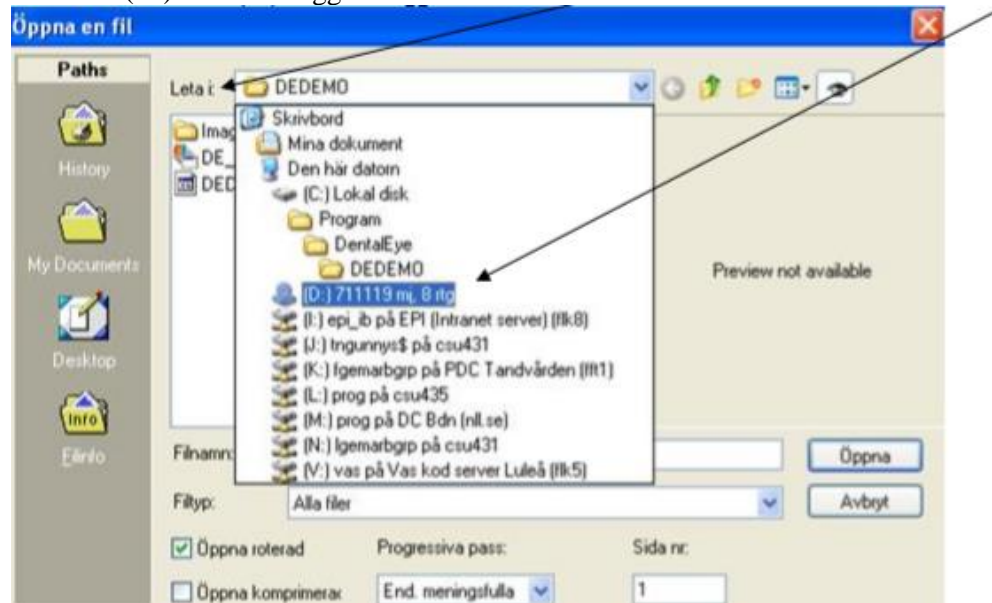


- Då kommer denna ruta upp med fotona/rtg-bilderna som ikoner

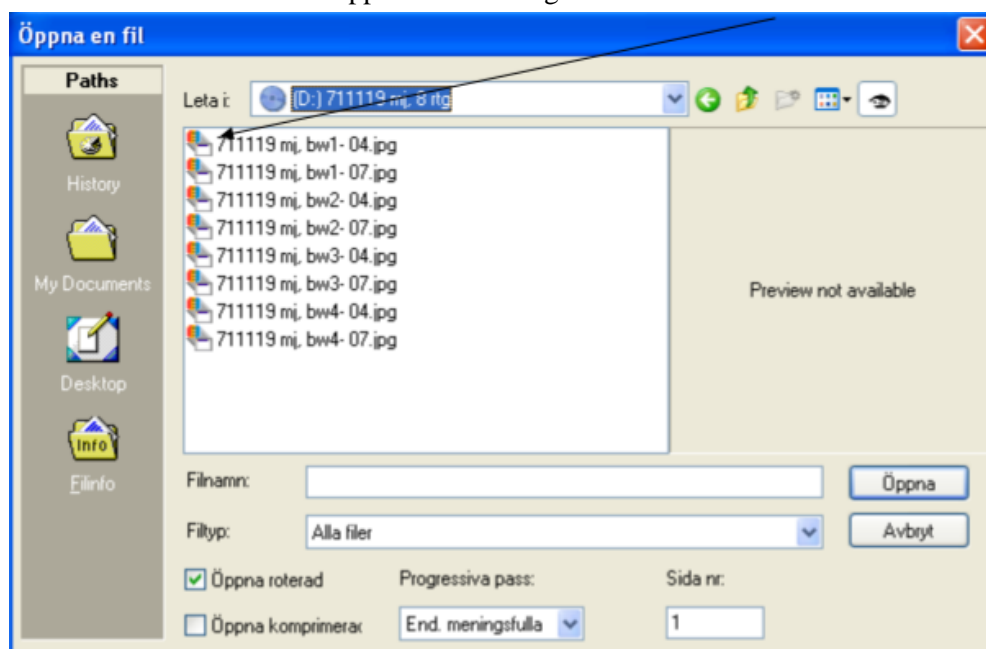

- Markera alla ikoner och klicka på ”Öppna”

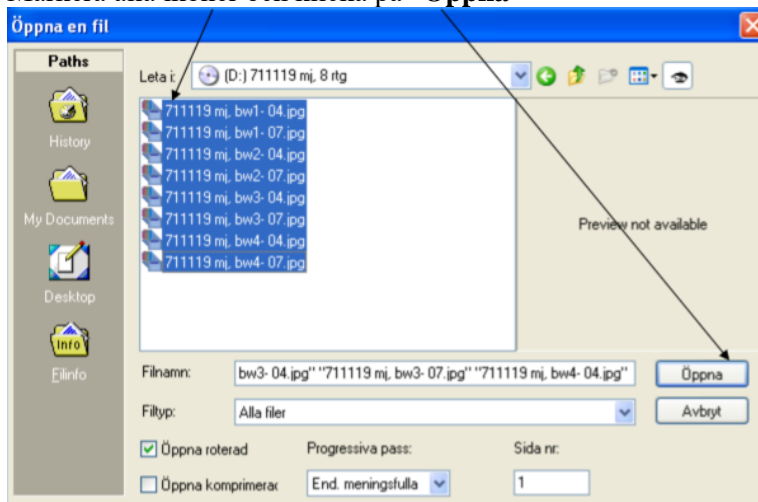

- Nu kommer bild efter bild, ta ”OK” så ramlar dom in i mallen.

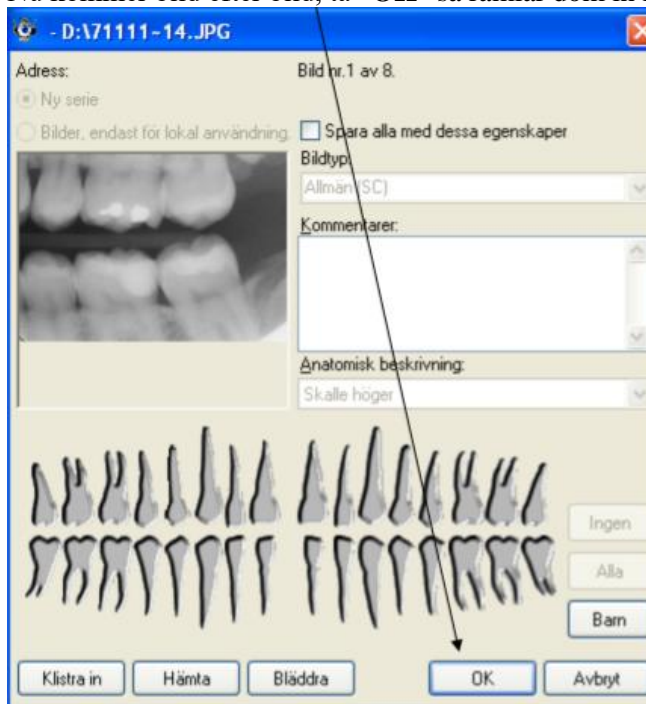

- När alla bilder fallit in i mallen **sparar man och godkänner** bildkortet.



- Ta ut CD:n från datorn