

Checklista D Utprovning av eldriven rullstol med vårdarstyrning

Datum:	
Namn:	
Personnummer:	
Elrullstol modell:	

Förskrivarens ansvar är att kontrollera att hjälpmedlet är funktionellt innan det används på eller av patient, kontrollen ska göras enligt tillverkarens instruktioner, om sådana finns.

Inställning av elrullstolens funktioner

- Armstödshöjd Nackstöd Andra inställningar
 Benstödshöjd Sittdjup

Genomgång av elrullstolens funktioner

- Startknapp
 Hastighetsreglering Ryggvinkling Frikoppling Förvaring/laddning
 Vårdarstyrning Elektrisk sitsvinkling T ex körsträcka, köregenskaper Däcktryck
 Framåt/Bakåt/Svänga/Stanna Andra elfunktioner Väskkrokar, belastning Fastsättning i bil

Genomgång körning av eldriven rullstol med vårdarstyrning

Moment	Inte aktuellt	Klarar datum
Körning inomhus och utomhus:		
Kunna starta och stanna elrullstolen		
Köra framåt, bakåt och svänga inomhus		
Köra in/ ut genom entrén; ytterdörr/ lägenhetsdörr/ förrådsdörr		
Köra in/ ut ur hiss; på/ av lyftplatta/ ramp		
Köra i olika hastigheter t ex krypköra och maxfart		
Köra säkert i närområdet och andra aktuella utomhusmiljöer		
Reglera sittvinkel för överflyttning och/eller körläge		

Skriftlig information

- Bruksanvisning Låneförbindelse Information om förskrivet hjälpmedel
 ”Lån av elrullstol” Körjournal Överenskommelse om dubbelkommando