

Inspektion av lyftsele

Patientens namn	Personnr.
Lyftsele, modell och serienr. (Har personen flera likadana bör dessa märkas)	
Artikelnr.	Datum för förskrivning
Förskrivare (yrkestitel, namn, arbetsplats)	Telefon

Kontrollpunkter:	Godkänd	Ej godkänd	
1. Tyg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Kantband	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Bandöglor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Benstödsöglor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Styrhandtag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Sömmar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Förstärkningssömmar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Komplettering			
A. Spänne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Nytt spänne kan beställas från leverantören.</i>			
B. Produktetikett	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Ny produktetikett kan beställas från leverantör kostnadsfritt.</i>			
C. Lattor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Nya lattor kan beställas från leverantören.</i>			
D. Dokumentation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Bruksanvisning kan skrivas ut från leverantörens hemsida.</i>			
E. Avkortningsläge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Om avkortningsläget har skadade sömmar kan en knut slås på öglan.</i>			

Om lyftselen har en eller flera kontrollpunkter (1-7) med resultatet **Ej godkänd** ska lyftselen kasseras. Övriga punkter (A-E) kan vid behov kompletteras.

Inspektion av lyftsele bör ske efter varje tvätt men minst var 6:e månad vid normal användning.

Vid hårt slitage eller om selen tvättas ofta bör inspektion ske oftare.

Dokumentationen ska ifyllas vid varje inspektion och förvaras hos patienten.

Om alla kontrollpunkter 1-7 är godkända ska signeringslistan på sid 2 användas.

Ifyllandet av blanketten ska ske av en person som har tillräcklig kunskap för att utföra inspektionen.

Datum	Inspektion utförd av:
--------------	------------------------------

