


## Lån av ramper

Är behovet att rampen ska vara permanent på plats, kan inte förskrivning ske utan en varaktig lösning bör ordnas till exempel bostadsanpassning.

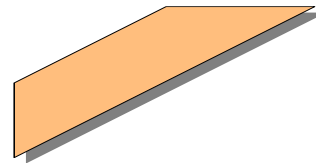

**Du har fått låna hopfällbara och flyttbara ramper för:**

**tillfälligt behov**- Vid tillfälligt behov av ramp i den egna bostaden eller vid tillfälliga resor/besök där miljön inte är tillrättalagd.

Ramperna ska återlämnas datum:.....

Vid regelbunden användning i vardagsaktiviteter utanför bostaden lånar du ramp så länge behovet kvarstår.

**Modell:**.....

**Individnummer:**.....

## Säkerhetsaspekter

- **Kontrollera alltid att ramperna ligger stabilt på plats innan användning och att det är rätt avstånd mellan ramperna för att passa just din rullstol.**
- **Ramperna får endast användas till de rullstolar, höjder och vikter som tillverkaren anger i bruksanvisningen.**
- **Observera att det innebär en risk att använda ramp när patienten sitter kvar i rullstolen - iaktta försiktighet!**
- **Vi rekommenderar att patienten inte själv kör uppför och nerför teleskoprampen.**
- **Tänk på att en vårdare som skjuter på bakom rullstolen själv har svårt att hitta någon plats att gå på – iaktta försiktighet!**

<b>Rekommendation, rampens lutning:</b> 20 cm nivåskillnad minst 1 m lång ramp 40 cm nivåskillnad minst 2 m lång ramp 60 cm nivåskillnad minst 3 m lång ramp
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Ramper är inte utprovade för att användas i och ur bil.**

**Ramperna är dina personliga hjälpmedel och får inte lånas ut till annan person.**

## Checklista vid utprovning

Förskrivarens ansvar är att kontrollera att hjälpmedlet är funktionellt innan det används på eller av patient, kontrollen ska göras enligt tillverkarens instruktioner, om sådana finns.

- Rampernas längd.....cm
- Ramperna får användas vid max höjd.....cm
- Rampens max belastning.....kg
- Hopfällning/ montering
- Bruksanvisning har lämnats

I bruksanvisningen finns detaljerad information om ramperna.

Bruksanvisningen bör läsas av de som ska montera och använda ramperna.

### Ansvar

Patient som lånar hjälpmedel som används i hemmiljön uppmanas att se över sitt försäkringsskydd mot till exempel stöld och brand samt även annan oförutsedd skadehändelse.

Patient kan bli ersättningsskyldig vid förlust eller skada på ett hjälpmedel.

### Din kontaktperson är:

Förskrivare (yrkestitel, namn).....

Arbetsplats .....

Telefon.....

När du inte längre behöver ramperna återlämnas dem till:

.....

**Länsservice:** Service Direkt 0920-712 12

Boden, Verkstadsv. 10

Piteå sjukhus

Kalix sjukhus

Gällivare sjukhus

Kiruna sjukhus