

Rutin för höftskyddsbyxa

Syfte

Att förebygga höftfrakturer på uppegående patienter med dokumenterad fallrisk enligt Senior Alert.

Omfattning

Fallprevention. Gäller för KC Internmedicin, Sunderby sjukhus

Användning

Höftskyddsbyxan sätts på före trosor/kalsonger och inkontinensskydd då den har öppen gren. Vid användning skrivs det in som en fallförebyggande åtgärd i vårdplan och utvärderas kontinuerligt. Höftskyddsbyxan finns i olika storlekar och anpassas efter varje patient. Höftskyddsbyxan placeras över lårbenshalsen för optimalt skydd.

Tvättråd

- Höftskyddsbyxan SafeHip® AirX kan tvättas minst 100 gånger i temperatur upp till 90°.
- Vid tvätt skall höftskyddsbyxan vändas ut och in.
- Använd ej klorblekmedel
- Använd gärna tvättpåse.