

	Muskelbiopsi (histopatologi)
Utförande laboratorium	Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.
Remiss	Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss. Provtyp i VAS: PAD Anamnesuppgifter ifylls noggrant.
Provtagning	Lägg preparatet snarast i 4% buffrad formaldehydlösning.
Provhantering	Utförande Muskelbiopsin skall ligga och slappa på fuktat papper eller i fuktkammare i 30 minuter innan fixering. Fixering 4% buffrad formaldehydlösning Förvaring och transport Förvaras i rumstemperatur i väntan på transport. Kontrollera att burkarna är ordentlig stängda så att de håller tätt. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.
Svarsrutiner	Dagtid måndag-fredag Vid snabbsvar: Telefonsvar till angivet telefon/sökarnummer lämnas till kunder med pappersremiss. Övriga kunder får elektroniskt svar.
Referensintervall / Beslutsgräns	Medicinskt utlåtande.
Indikation	Se vårdprogram.
Medicinsk bakgrund / Tolkning	Se aktuellt KVASt-dokument KVASt Svensk förening för Patologi
Interferens och felkällor	Resultatet vid diagnostiken är beroende av att volymen formaldehyd är tillräcklig.
Metod	Histopatologisk teknik
Ackrediterad	Nej

Huvudprocess	Ansvarig	Processledare	Sida 1 av 1
Dokumenttyp	Dokument-Id	Godkänt datum	Version